

Les

# Doc's Proplugs

se mettent en place en quelques secondes.



Photo 1

## Etape 1 :

Placer le **DOC'S PROPLUG** la face plate la plus large vers l'extérieur, de sorte que la partie la plus étroite vienne se loger à l'intérieur de l'oreille (cf photo 1).

Ne pas hésiter à tirer légèrement (ou écarter) l'oreille pour placer le **DOC'S PROPLUG** à l'intérieur du pavillon.



Photo 2

## Etape 2 :

Le **DOC'S PROPLUG** doit couvrir une surface maximum pour être bien maintenu à l'intérieur du pavillon (cf photo 2).

Insérer la partie supérieure du **DOC'S PROPLUG** (en forme de triangle) dans le rebord supérieur du pavillon (cf photo 3).

**insérer la partie supérieure du PROPLUG dans le rebord du pavillon.**



Photo 3

## Etape 3 :

Tirer légèrement sur la petite languette à l'extérieur du **DOC'S PROPLUG** pour vérifier que celui-ci est suffisamment maintenu à l'intérieur de l'oreille (il doit y avoir une certaine résistance).

Si le **DOC'S PROPLUG** sort tout seul, il faut choisir une taille plus grande afin d'épouser une surface maximum.

**ENTRETIEN : eau savonneuse, alcool modifié (70°)**

**UNIVERSAL SURF**

**22, Ave de la Myre-Mory - 47140 PENNE D'AGENAIS**  
**Tél. 06 11 77 85 48 - [www.universal-surf.com](http://www.universal-surf.com)**